




贴针




颜色表示	橙色	黄色	绿色	蓝色	粉色
针长	0.3mm	0.6mm	0.9mm	1.2mm	1.5mm
直径	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm
产品					

注:耳穴揿针胶布直径为9mm,体穴揿针胶布直径为12mm。

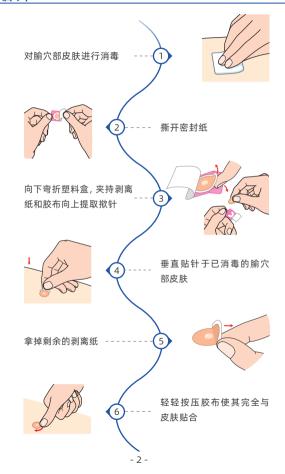

- 1 -

取针

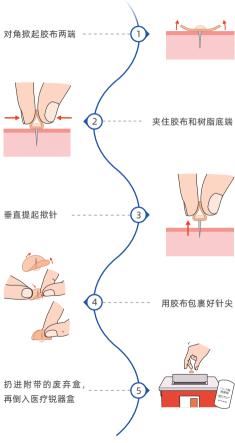

目录

偏头痛止痛	. 5
神经性头痛止痛	. 9
改善颅脑损伤后尿失禁症状	. 12
攻善恶心呕吐症状	. 16
攻善吞咽困难症状	. 19
改善舌强语蹇症状	.22
攻善尿失禁症状	. 26
	. 30

- 3 -

注: 所有穴位右上角所标为针体长度; 所有穴位定位左侧图为**精准取穴**, 右侧图为**简便取穴。** 除特别说明外, 所有的体穴均为双侧取穴, 耳穴为单侧取穴

偏头痛止痛

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: (1) 阿是穴^{0.9} (病痛局部或敏感反应点)、合谷^{1.2}、外关^{1.2}、太阳^{1.2} (2) 阿是穴^{0.9}、瞳子髎^{0.9}、合谷^{1.2}、太阳^{1.2} 耳穴: 神门^{0.6}、交感^{0.6}、脑点^{0.6}、内分泌^{0.6}



在手背,第2掌骨桡侧的中点 处。



一手拇指、食指张开呈90°,以 另一只手拇指指尖关节横纹压 在虎口上,指尖点到处即是。



在前臂后区,腕背侧远端横纹上2寸,尺骨与桡骨间隙中点。



抬臂俯掌,掌腕背横纹中点直 上3横指,前臂两骨头之间的凹 陷处即是。



在头部,眉梢与目外眦之间,向后约1横指的凹陷中。



眉梢与目外眦连线中点向后1 横指,触及一凹陷处即是。


- 5 - - 6 -



在面部,目外眦外侧0.5寸凹陷中。



正坐, 目外眦旁, 眼眶外侧缘 处。

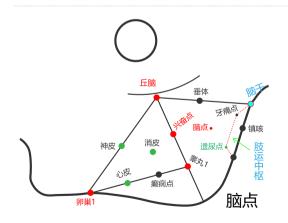

- 7 -



- 8 -

神经性头痛止痛


疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: 太阳1.2、悬颅0.9、太冲1.2

耳穴:皮质下0.6、缘中0.6



在头部,眉梢与目外眦之间,向后约1横指的凹陷中。

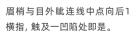



在头部,从头维穴至曲鬓穴的 孤形连线的中点处。



头维穴和曲鬓穴两穴连线中点 处即是。



在足背, 当第1、第2跖骨间, 跖骨底结合部前方凹陷中, 或触及动脉搏动。



足背,沿第1、第2趾间横纹向 足背上推,可感有一凹陷处即 是。

- 9 -



改善颅脑损伤后尿失禁症状

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴:肾俞^{1,2}、气海^{1,2}、关元^{1,2}、中极^{1,2}、膀胱俞^{1,2}、 关元俞^{1,2}



在脊柱区,第2腰椎棘突下,后 正中线旁开1.5寸。



脐水平线与脊柱相交椎体处, 正中线旁开2横指处即是。

- 12 -



在下腹部,脐中下1.5寸,前正中线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央向下2横指处即是。



在下腹部,脐中下4寸,前正中线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央向下两个3横指处即是。



在下腹部,脐中下3寸,前正中线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央向下4横指处即是。



在骶区,横平第2骶后孔,骶正中嵴旁1.5寸。



两侧髂棘高点连线与脊柱交点, 往下推3个椎体,旁开2横指处 即是。

- 13 -



在脊柱区,第5腰椎棘突下,后 正中线旁开1.5寸。



两侧髂棘高点连线与脊柱交点, 往下推1个椎体,旁开2横指处 即。

改善恶心呕吐症状

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: 内关^{1.2}、中脘^{1.2}、足三里^{1.2}、合谷^{1.2} (孕妇禁用)



在前臂前区,腕掌侧远端横纹 上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈 肌腱之间。



从腕横纹向上3横指,两条索 状筋之间即是。

- 15 - - 16 -



在上腹部,脐中上4寸,前正中线上。



在上腹部,正中线上,肚脐往上5横指处即是。



在手背,第2掌骨桡侧的中点 处。



一手拇指、食指张开呈90°,以 另一只手拇指指尖关节横纹压 在虎口上,指尖点到处即是。



在小腿外侧, 犊鼻穴下3寸, 犊鼻穴与解溪穴连线上。



站位弯腰,同侧手虎口围住髌骨上外缘,余四指向下,中指指尖处即是。

- 17 - - 18 -

改善吞咽困难症状

疗程: 3次为一个疗程,每次埋针24-72小时,每隔3-4小时按压一次,即点按20下,以患者能承受为度。

体穴: 廉泉^{1,2}、上廉泉^{1,2}、翳风^{1,2}(双侧)、颈3/4/5 夹脊穴^{1,2}(双侧)



在颈前区, 喉结上方, 舌骨上缘凹陷中, 前正中线上。



仰头,从下巴沿颈前正中线向下推,喉结上方可触及舌骨体, 上缘中点处即是。



在廉泉穴上1寸,或于前正中线 颌下1寸,当舌骨与下颌缘之间 凹陷处取穴。



在廉泉穴上1寸,或于前正中线 颌下1寸,当舌骨与下颌缘之间 凹陷处取穴。



在颈部,耳垂后方,乳突下端前方凹陷中。



头偏向一侧,将耳垂下压,所 覆盖范围中的凹陷处即是。

- 19 - - 20 -



位于颈部正中线两侧,在第3~5颈椎棘突下缘旁开0.5寸处。



位于颈部正中线两侧,在第3~5颈椎棘突下缘旁开0.5寸处。

改善舌强语蹇症状

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴:上廉泉^{1,2}、哑门^{1,2}、承浆^{0,9}、大椎^{1,2}、通里^{1,2} (双侧)、列缺^{1,2}(双侧)、照海^{0,9}(双侧)



在廉泉穴上1寸,或于前正中线 颌下1寸,当舌骨与下颌缘之间 凹陷处取穴。



在廉泉穴上1寸,或于前正中线 颌下1寸,当舌骨与下颌缘之间 凹陷处取穴。

- 21 - - 22 -



在颈后区,第2颈椎棘突上际凹陷中,后正中线上。



沿脊柱向上,入后发际上半横 指处即是。



在面部, 颏唇沟的正中凹陷处。



正坐, 颏唇沟的正中按压有凹陷处即是。



在脊柱区,第7颈椎棘突下凹陷中,后正中线上。



低头,颈背交界椎骨高突处椎体,下缘凹陷处即是。



在前臂前区,腕掌侧远端横纹 上1寸,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。



用力握拳,沿两筋(掌长肌腱与 桡侧腕屈肌腱)间的切陷从腕 横纹向上量1横指处。

- 23 -



在前臂,腕骨桡侧远端横纹上 1.5寸,拇短仲肌腱与拇长展肌 腱之间的凹陷中。



两手虎口相交, 手食指压另一 手桡骨茎突上, 食指尖到达处 即是。



在踝区,内踝尖下1寸,内踝下缘边际凹陷中。



坐位垂足,由内踝尖垂直向下 推,至下缘凹陷处,按压有酸 痛感处即是。

改善尿失禁症状

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: 气海^{1.2}、关元^{1.2}、中极^{1.2}、膀胱俞^{1.2}、关元俞^{1.2} 耳穴: 肾^{0.6}、膀胱^{0.6}、皮质下^{0.6}、肝^{0.6}、腰骶部反应点



在下腹部,脐中下1.5寸,前正中线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央向下2横指处即是。

- 25 - - 26 -



在下腹部,脐中下3寸,前正中线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央向下4横指处即是。



在骶区, 横平第2骶后孔, 骶正中嵴旁1.5寸。



两侧髂棘高点连线与脊柱交点, 往下推3个椎体,旁开2横指处 即是。



在下腹部,脐中下4寸,前正中线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央向下两个3横指处即是。



在脊柱区,第5腰椎棘突下,后 正中线旁开1.5寸。



两侧髂棘高点连线与脊柱交点, 往下推1个椎体,旁开2横指处 即。

- 27 -

- 28 -



改善便秘症状

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: 合谷^{1,2}、足三里^{1,2}、天枢^{1,2}、大横^{1,2}、中脘^{1,2}、 胃俞^{1,2}、脾俞^{1,2}



在手背,第2掌骨桡侧的中点处。



一手拇指、食指张开呈90°,以 另一只手拇指指尖关节横纹压 在虎口上,指尖点到处即是。

- 29 -



在小腿外侧, 犊鼻穴下3寸, 犊鼻穴与解溪穴连线上。



站位弯腰,同侧手虎口围住髌骨上外缘,余四指向下,中指指尖处即是。



在腹部, 脐中旁开4寸。



仰卧,由乳头向下作与前正中 线的平行线,再由脐中央作一 水平线,交点处即是。



在腹部,横平脐中,前正中线旁开2寸。



仰卧,肚脐旁开3横指,按压有酸胀感处即是。



在上腹部,脐中上4寸,前正中线上。



在上腹部,正中线上,肚脐往上5横指处即是。

- 31 - - 32 -



在脊柱区,第12胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸。



肚脐水平线与脊柱相交椎体处, 往上推2个椎体,正中线旁开2 横指处即是。




在脊柱区,第11胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸。



肚脐水平线与脊柱相交椎体处, 往上推3个椎体,正中线旁开2 横指处即是。

注意事项

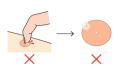

贴针期间请勿抓抠、抓挠突起的树脂,请勿对贴针部位进行重压、拍打、冲撞、碰撞。



若贴针部位出现发红、发痒、或大面积出现异常反应时,请立即取下停止使用。



本产品为非通电针具,请勿用于电疗。





贴针部位不能被水长时间浸泡。



贴针期间每隔3-4小时点按一次,每次 按压约20下,以患者能承受为度。

- 33 -

生 产 者: セイリン株式会社(清铃株式会社) 邮政编码: 424-0037

地 址: 日本静冈县静冈市清水区袖师町1007-1 网 址: www.seirin.jp

(中国代理/售后服务机构) 四川源泉医疗器械有限公司

地址: 眉山经济开发区新区本草大道北段3号

电话: 028-8667 4666 传真: 028-8514 1899 邮编: 620010







医疗器械注册号: 国械注进20162271259

产品标准: 进口产品注册标准YZB/JAP 3001-2012《揿针》